

Compass[®]

INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA
para Dentistas

ImplantGuide – Cirurgia Guiada de Implantes

Para planejamento da cirurgia guiada de implantes e confecção das guias cirúrgicas, é necessário:

- Caso Parcial (mínimo de 3 dentes em boca, pelo menos 1 dente em cada hemiarco): pedido no site, tomografia do paciente e modelos digitais.
- Caso Total (protocolo, desdentados totais ou pacientes com menos de 3 dentes na arcada): pedido no site, tomografia do paciente e tomografia da prótese.

Pedido no site

Caso seja o primeiro pedido, é necessário fazer um cadastro no site (compass3d.com.br) com registro de login e senha. Após o login basta cadastrar o paciente e em seguida fazer um pedido de Implant Guide. A documentação será anexada ao pedido no site (aba arquivos).

- **Caso parcial**

Tomografia do paciente

Tomografia de toda arcada na qual será feito o implante (maxila ou mandíbula). Fazer tomografia com afastador labial (expandex) e em desocclusão (boca semiaberta ou aberta). Precisamos dos arquivos DICOM ou XSTD, caso sejam muito extensos para anexar ao site, pode enviar via wetransfer (www.wetransfer.com) para o e-mail exames@compass3d.com.br.

Modelos

Os modelos podem ser digitais (formato stl ou escaneamento intraoral) ou em gesso. Caso seja em gesso, vazar em gesso tipo IV (especial) e enviar para a Compass para



Compass[®]


INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA
para Dentistas

serem escaneados. Os mesmos devem estar marcados em grafite/lápis indicando a oclusão e bem embalados para não quebrarem no transporte.

- **Casos totais (protocolo)**

Marcações na próteses: Dentista deve fazer 6 marcações de guta percha de 2mm na flange da prótese (as marcações devem estar presentes nas partes anterior e posterior da prótese).



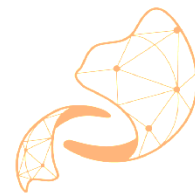

Compass[®]

INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA
para Dentistas

Tomografia 1 (paciente com prótese)*

Tomografia* da arcada que serão feitos os implantes do paciente, com a prótese em boca. O paciente deve usar um registro de mordida de silicóna durante a tomografia para evitar que a prótese mude de posição no momento do exame.



Tomografia 2 (tomografia da prótese)*

Tomografia somente da prótese, lembrando-se de usar algum anteparo para separar a prótese da mesa do tomógrafo. (exemplo: caixinha de isopor).

*Precisamos dos arquivos DICOM ou XSTD, caso sejam muito extensos para anexar ao site, pode enviar via wetransfer (www.wetransfer.com) para o e-mail exames@compass3d.com.br.



Compass[®]

INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA
para Dentistas

Planejamento

O planejamento pode ser feito de três formas

- Videoconferência: é marcado um horário com a equipe de planejamento da Compass, para uma videoconferência via Skype.
- Relatório: o dentista envia as informações (posição, tamanho pretendido, quantidade e marca do implante) e ele recebe o relatório para aprovação.
- Software: a Compass disponibiliza a versão gratuita de planejamento do software para o dentista planejar o caso em seu computador e enviar para a Compass para a confecção do guia.

Após a finalização do pedido e recebimento de toda documentação solicitamos 3(três) dias úteis para marcação da videoconferência ou recebimento do relatório, feito o planejamento as guias devem chegar ao destino em cerca de 5 dias úteis, podendo variar de acordo com a localidade.